



Nutrición más allá de las fronteras:

cómo viajar con BD BodyGuard™



Adaptación de tratamientos para estilos de vida independientes

El trastorno de la nutrición es un estado clínico grave causado, entre otras cosas, por un cáncer, una cirugía o una disfunción gastrointestinal. Por este motivo, los pacientes que padecen varias enfermedades suelen emplear la nutrición parenteral total. No obstante, en función de la flexibilidad y el tamaño de la solución de infusión, los pacientes a menudo se enfrentan no solo a un nuevo tratamiento, sino también a las consecuencias que ello conlleva para su independencia.


En BD, observamos al paciente más allá del proceso. Nuestra solución de NPT contribuye a garantizar que su libertad no se ve comprometida. La BD BodyGuard™, así como sus accesorios correspondientes, ayuda a los pacientes a alcanzar la independencia que desean. Le invitamos a emprender un viaje por esta guía para descubrir de qué manera los viajes soñados de sus pacientes pueden seguir siendo una realidad gracias a la solución BD BodyGuard™.



Accesorios flexibles, pocas limitaciones

BD ofrece una amplia variedad de accesorios que se pueden utilizar tanto para NPT pediátrica como en adultos.

El transporte de la bolsa de nutrición es fundamental para garantizar la flexibilidad a la hora de someterse a un tratamiento de NPT. Nuestras mochilas BD BodyGuard™ están minuciosamente concebidas para que los pacientes puedan moverse con bolsas de nutrición de 2 o 3 litros.

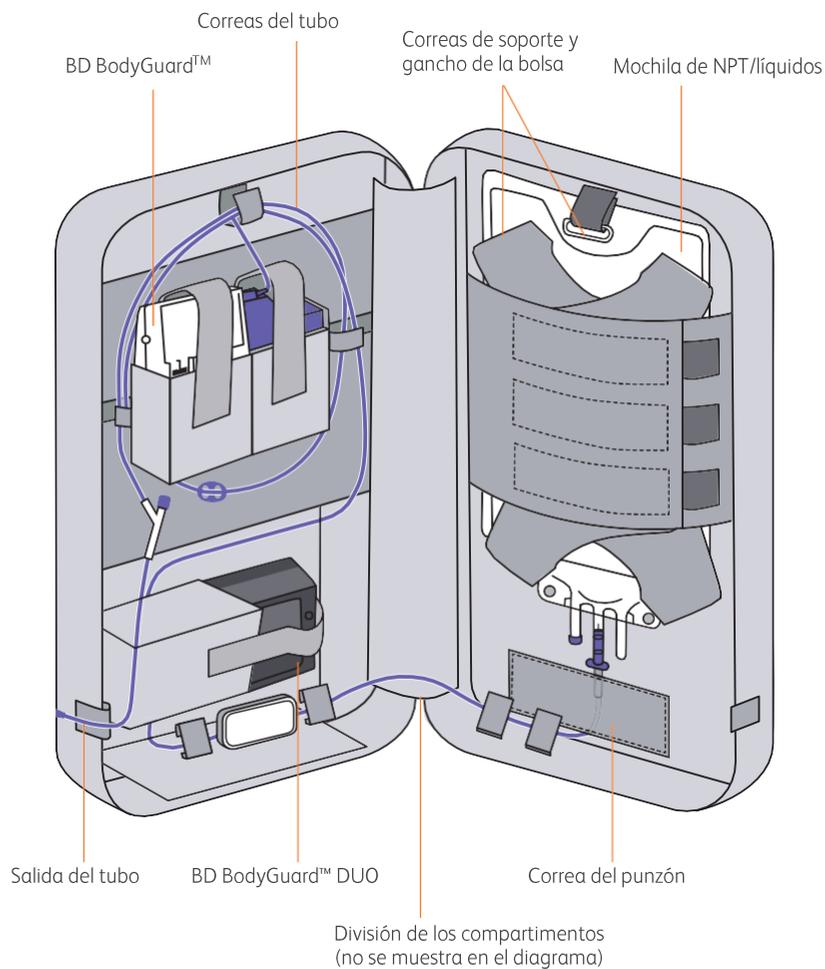

Maletín de transporte,
kit de infusión,
ref. CASE00002



Carrito con ruedas,
ref. CNC00001



Bolsa de 3 litros,
ref. BAG00008



Bolsa de 2 litros,
ref. 160-002XG,
ref. 160-002XB,
ref. 160-002XP
(gris, negro y rosa)



Bolsa de transporte
de 500 ml,
ref. 150-001X

En continuo movimiento

Además de garantizar que se cumplen las necesidades de transporte de sus pacientes, proporcionar una batería con una larga duración es fundamental para garantizar que estos puedan permanecer desconectados el mayor tiempo posible.

La larga duración de la batería de la bomba BD BodyGuard™ con una sola carga puede proporcionar a sus pacientes la confianza y la libertad que necesitan para llevar a cabo sus actividades cotidianas.



Batería recargable,
ref. 130-050XV
(1800 mAh)



Batería recargable,
ref. 130-051XV (3600
mAh)



Cargador de
pared, ref.
999-WC, de
8,2 V

Especificaciones de la batería

Batería de 7,4 V de polímero de litio recargable, 1800 mAh

Duración a 25 y 125 ml/h: 15 h

Duración a 1200 ml/h: 8 h

3600 mAh Duración a 125 ml/h (opcional): hasta 30 h

Nuestra amplia variedad de accesorios permite equipar a sus pacientes para viajar:



En coche



En tren



En avión

Nuestra BD BodyGuard™ ayudará a sus pacientes a expandir sus fronteras y les permitirá explorar el mundo.



Aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de elegir un destino de vacaciones

Cuando esté planificando sus vacaciones, deberá tener en cuenta muchos aspectos. Hemos elaborado una sencilla lista de verificación para ayudarle.

Qué necesita para iniciar el tratamiento de infusión de NPT

Sistema de infusión BD BodyGuard™

1. Bomba de infusión BD BodyGuard™
2. Cable de alimentación o cable de carga de la batería
3. Conjunto de batería recargable de 1800 mAh (dentro de la bomba)
4. Instrucciones de uso (en formato de impresión)

¿Tiene ganas de viajar? La adaptación a su equipo clínico es fundamental:

- Pida consejo a su equipo de asistencia clínica u hospitalaria
- Pida a su médico el certificado médico pertinente
- Compruebe su seguro médico

Consejos para decidir su destino

- Seleccione un lugar con un clima de templado sin humedad elevada
- Asegúrese de que puede acceder fácilmente a una nevera con una temperatura constante
- Seleccione un lugar con altos niveles de higiene
- Localice el centro de nutrición más cercano
- Viaje con un acompañante

Cómo empaquetar su material de nutrición

- Prepare el embalaje de manera que se garantice la seguridad adecuada durante el transporte
- Asegúrese de que las mochilas de la formulación magistral se guardan a una temperatura adecuada
- Planifique una posible entrega de los preparados a la dirección de su destino

¿Va a viajar en avión? Acuérdesse de llevar a cabo estos pasos:

- Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para informarles de sus planes de vuelo y de su situación médica
- Rellene un formulario de renuncia por exceso de equipaje
- Solicite una carta de exención de equipaje médico



2122031CE01
NB 0344

Para obtener más información acerca de nuestra amplia solución de NPT,
póngase en contacto con su representante de ventas de BD.

BECTON DICKINSON, S.A.U. - Camino de Valdeoliva, s/n 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid

bd.com/es-es

